

EHBO**VLAANDEREN**

WWW.EHBO.VLAANDEREN

MODULAID



MODULAID

EERSTE HULP KOFFER OP MAAT


EHBO VLAANDEREN

Bosstraat 48

9080 Lochristi

info@ehbo.vlaanderen

+32 475 71 86 43

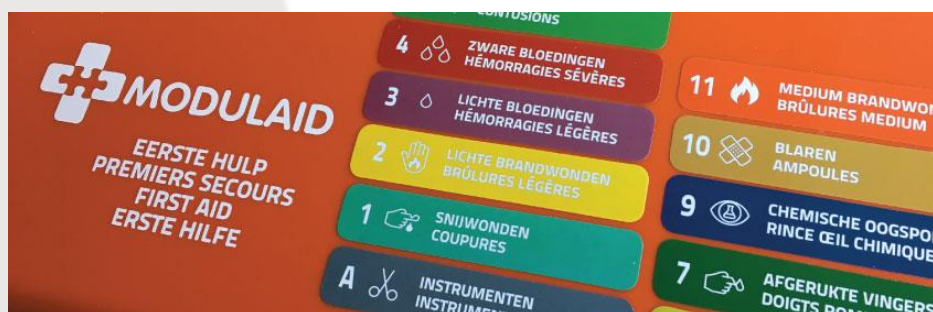

Waarom Modulaid?



Bouw een verbanddoos op jouw maat

Met Modulaid stel je een verbanddoos samen die perfect is afgestemd op de specifieke risico's in jouw bedrijf.



Vind altijd snel en makkelijk het juiste EHBO-materiaal

Gedaan met zoeken. Dankzij duidelijke iconen en kleuren vind je in geen tijd het juiste materiaal. Een module bevat telkens al het nodige voor 1 specifieke behandeling.



Vereenvoudig controle en inventarisatie

Met de bijbehorende app maak je een inventaris van je doos én bestel je de bijvulling in een handomdraai. Bovendien krijg je een handig overzicht van de uitgevoerde controles en bijvullingen voor de arbeidsinspectie en word je verwittigd wanneer een module bijna vervalt.

Hoe werkt Modulaid?



Verskillende modules

De Modulaid dozen bestaan uit verschillende modules, gericht op specifieke kwetsuren. Aan de hand van deze modules stel je de ideale verbanddoos samen voor jouw onderneming.



Unieke doos

Elke doos krijgt een unieke QR-code waarmee je dan via onze app gemakkelijk de inventaris kunt maken. Scan de QR-code van de doos en de barcodes van de modules.



In orde voor arbeidsinspectie

Je krijgt een reminder via mail als een module gaat vervallen of als het tijd is voor de jaarlijkse inventaris. Na het maken van de inventaris worden de ontbrekende modules automatisch besteld en verstuurd. Zo is de verbanddoos steeds up-to-date. Uiteraard kun je ook steeds modules bijbestellen, los van de inventarisatie.

Kenmerken



Unieke QR-code

Elke doos is voorzien van een unieke QR-code die gelinkt is aan de inhoud van de doos



Handige app

Maak in 1-2-3 een inventaris en bestel ontbrekende modules



Stickers met modules

Om vlug te zien welke modules de doos bevat



Verzegelde modules

Snel zichtbaar welke modules geopend zijn

MODULES A TOT E

De modules met een letter zijn meermaals te gebruiken. Deze bevatten bijvoorbeeld de schaar die je vaker kunt gebruiken, of pleisters voor meerdere kwetsuren.

A



INSTRUMENTEN INSTRUMENTS

Inhoud:

- 1 Verbandschaar
- 1 Splinterpincet
- 4 Veiligheidsspelden
- 1 EHBO-instructies



B



PLEISTERS EXTRA PANSEMENTS EXTRA

Inhoud:

- 50 elastische pleisters 19x72mm
- 50 elastische pleisters 120x20mm

C



HACCP PLEISTERS EXTRA PANSEMENTS HACCP EXTRA

Inhoud:

- Visueel en magnetisch detecteerbaar, HACCP
- 50 waterafstotende pleisters 19x72mm

- Visueel en magnetisch detecteerbaar, HACCP
- 50 waterafstotende pleisters 120x20mm

D



INSECTENBETEN PIQÛRES D'INSECTES

Inhoud:

1 Insectenpompje

EHBO-instructies:

1. Haal de onderdelen uit de doos, trek het handvat zo ver mogelijk uit en draai het handvat voorzichtig tot het vastklikt
2. Zet het passend opzetstuk op de pomp. Trek de zuigpomp zo ver mogelijk uit zodat de pomp het gif kan uitzuigen
3. Pomp meerdere keren tot er vloeistof in het opzetstukje verschijnt. Verwijder de pomp, reinig de wonde en herhaal stap 2 en 3 tot bloed verschijnt.
4. Spoel de uitgezogen vloeistof voorzichtig weg. Na gebruik, zoek medische hulp, indien nodig.



E



COLD HOT PACK

Inhoud

Cold hot pack

EHBO instructies

Stappenplan voor koude therapie:

Bewaar de cold hot pack in de diepvries (-10 °C tot -25 °C) tenminste 15 minuten voor gebruik. Gebruik met het beschermende hoesje.

Stappenplan voor warmte therapie:

Verwarm de cold hot pack in de microgolfoven (700-800W), niet langer dan 1 minuut. Bij verschillende microgolfovens kan de opwarmtijd variëren. Gebruik met het beschermende hoesje.



MODULES 1 TOT 12

De modules met een cijfer zijn slechts éénmaal te gebruiken. Elke module bevat al het nodige om een kwetsuur te behandelen. Na deze behandeling is de module dus opgebruikt en moet deze vervangen worden.

1



SNIJWONDEN COUPURES

Inhoud

- 2 Vinyl handschoenen
- 1 Wondreinigende lotion 10ml
- 3 Wondreingende doekjes
- 2 Wondpleisters vingertop
- 2 Wondpleisters 12cm x 2cm
- 4 Wondpleisters 19cm x 72cm
- 5 Vingerlingen - Finger Bobs

EHBO instructies

1. Doe de handschoenen aan
2. Reinig de wonde met de lotion
3. Kies de pleister die het best past bij de plaats van de wonde en verstevig met de fingerbobs.



2



LICHT BRANDWONDEN BRÛLURES LÉGÈRES

Inhoud

- 3 Wondreinigende doekjes
- 2 Handschoenen
- 1 Brandwondengel
- 3 Niet-klevende kompressen
- 1 Elastisch verband
- 1 Tape Non-woven

Stappenplan EHBO

1. Koel de brandwonde af met koel of lauw kraantjeswater
2. Doe de handschoenen aan
3. Breng de koelende brandwondengel aan
4. Bedek met een kompres en fixeer met het verband en de tape (schaar bevindt zich in module A)



3



LICHT BLOEDINGEN HÉMORRAGIES LÉGÈRES

Inhoud

- 2 Handschoenen
- 1 Wondreinigende lotion 10ml
- 2 Kompressen
- 5 Huidhechtstrips
- 2 Niet klevende kompressen
- 1 Wondpleister non-woven 6cmx1m
- 1 Drukverband 8x10cm
- 1 Elastisch verband 6cm
- 1 Tape Non-woven 1.25cm



EHBO instructies

1. Doe de handschoenen aan
2. Reinig de wonde met de lotion
3. Dep de huid rond de wonde af met een kompres
4. Hecht eventueel de wonde met de huidhechtstrips
5. Bedek met een niet-klevend kompres en fixeer met de wondpleister of het verband en de tape (schaar bevindt zich in module A)

4



ZWARE BLOEDINGEN HÉMORRAGIES SÉVÈRES

Inhoud

- 2 Handschoenen
- 1 Niet-klevend kompres
- 1 Bloedstelpend drukverband

EHBO instructies

1. Doe de handschoenen aan
2. Bedek de wonde met het niet-klevende kompres
3. Plaats het kussen van het drukverband op de kompres. Druk stevig op het kussen. Rol het verband rond de ledemaat terwijl u blijft drukken. Controleer regelmatig de polsslag onderaan de wonde. Bij vertraging van de polsslag, de druk van het verband verminderen.



5



KNEUZINGEN CONTUSIONS

Inhoud

- 1 Instant cold pack
- 1 Driehoeksverband
- 1 Zelfklevend steunverband

EHBO instructies

Bij een kneuzing: Koel de kneuzing maximaal 20 minuten af met de instant cold pack.

Bij een verstuiking of breuk: Koel de verstuiking of breuk maximaal 20 minuten af met de instant cold pack.

Verstevig met het zelfklevend steunverband of verbind met het driehoeksverband.



6



NOODGEVAL URGENCE

Module 6 bevat alles voor bepaalde noodgevallen waarbij reanimatie is vereist of bij onderzoeking.

Inhoud

- 2 Vinyl handschoenen
- 1 CPR masker
- 1 Reddingsdeken

EHBO instructies

1. Doe de handschoenen aan en gebruik het CPR masker voor reanimatie om besmettingen te vermijden en efficiënter te beademen.
2. Bedek het slachtoffer met het isolatiedeken.

Reanimatie:

1. Geef 30 borstcompressie aan een snelheid van 100-120 per minuut. Druk hierbij de borstkas 5-6cm in.
2. Geef 2 mond-op-mondbeademingen.
3. Wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen



7



AFGERUKTE VINGERS DOIGTS ROMPUS

Module 7 bevat alles voor het transporteren van een afgerukte vinger. Het snelle en koele transport is cruciaal voor het recupereren van de vinger.

Inhoud:

- 2 Handschoenen
- 2 Steriele kompressen
- 1 Beschermzak
- 1 Isolatiezak
- 1 Instant cold pack
- 1 Reddingsdeken

Stappenplan EHBO

1. Stelp de bloeding met [Module 3: Lichte Bloedingen](#)
2. Doe de handschoenen aan
3. Wikkel de vinger in een steriel kompres
4. Stop het in de beschermzak die je vindt in de isolatiezak
5. Breek de instant cold pack en steek het naast de beschermzak in de isolatiezak
6. Neem de gesloten isolatiezak mee naar het ziekenhuis en bedek het slachtoffer eventueel met het reddingsdeken



8



OOGSPOELING RINCE ŒIL

Inhoud

- 1 Oogspoeling
- 2 Oogkompressen

EHBO Instructies

1. Was je handen
2. Spoel het oog overvloedig met de oogspoeling.
3. Dek het oog af met een oogkompres.



9



CHEMISCHE OOGSPOELING RINCE ŒIL CHIMIQUE

Inhoud

2 Oogkompressen

1 Neutraliserende chemische oogspoeling: Deze bevat een steriele fosfaatoplossing (4,9%) en is bedoeld voor snelle neutralisatie van chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld alkaliën en zuren.

EHBO instructies

1. Was je handen
2. Spoel het oog overvloedig met de oogspoeling.
3. Dek het oog af met een oogkompres.



10



BLAREN AMPOULES

Inhoud

2 Handschoenen

1 Ontsmettende lotion 10ml

2 Kompressen

2 Blarenpleisters - S

1 Blarenpleisters - L

EHBO instructies

Is de blaar niet open? Bedek hem dan met een blarenpleister voor een snellere genezing.

Is de blaar wel open?

1. Doe de handschoenen aan
2. Reinig de blaar met de lotion
3. Dep de huid rond de blaar met een kompres
4. Bedek de blaar met een blarenpleister



11



MEDIUM BRANDWONDEN BRÛLURES MEDIUM

Inhoud

2 Handschoenen

1 Brandwondengelkompres

1 Steriel EHBO-doek

1 Elastisch verband

1 Tape non-woven


Inhoud

- 2 Nitril handschoenen
- 3 Wondreinigende doekjes
- 1 Wondreigende lotion 10ml
- 4 Detecteerbare wondpleisters vingertop
- 4 Detecteerbare wondpleisters 12cm x 2cm
- 4 Detecteerbare wondpleisters 7cm x 2cm
- 5 Detecteerbare vingerlingen - Finger Bobs


EHBO instructies

1. Doe de handschoenen aan
2. Reinig de wonde met de lotion of de doekjes
3. Kies de pleister die het best past bij de plaats van de wonde en verstevig met de fingerbobs.

Inventaris maken met de app


1. Scan de QR-code van uw doos en kies 'check'



2. Scan de barcodes van de modules



3. Bestel de ontbrekende en vervallen modules

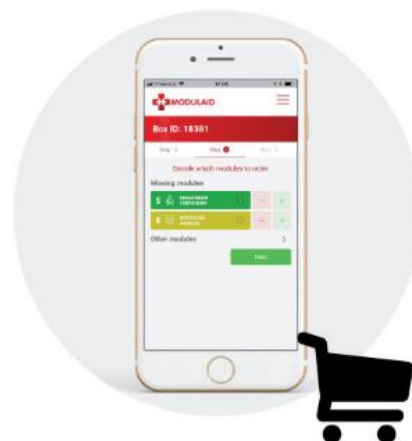

Voeg een nieuwe module aan uw verbanddoos met de app

1. Scan de QR-code van uw doos en kies 'restock'



2. Scan de barcode van de nieuwe module



3. Voeg de nieuwe module toe aan de doos



[App in Google store](#)

Vrijblijvende offerte?

Graag je volledige naam, adres en eventueel BTW nummer doormailen naar:

info@ehbo.vlaanderen